

フロントキャリー取付け・取扱説明書

この度は、フロントキャリーをお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく、安全にお使いいただくために、この説明書をよくお読みください。
また、大切に保管し、必要に応じてお読みください

取付け可能な車椅子

取付け前に、下記の条件を確認していただき、取付け可能かご確認ください。


- 取付け場所のパイプ径が、 $\phi 18$ 、 $\phi 20\text{mm}$ または $\phi 22\text{mm}$ 、 $\phi 26\text{mm}$ のもの。
※取り付ける場所に、他の付属品がある場合には取り付けることが
出来ない場合があります。

構成部品

次の部品が同梱されていることを確認してください。

部品名	数量
本体	2
クランプ	2
ボルト (M6×20mm)	2
ボルト (M6×35mm)	2
ナット (M6 ナイロン)	4
$\phi 18\text{mm}$ アダプター	2
$\phi 20\text{mm}$ アダプター	2
$\phi 22\text{mm}$ アダプター	2

取付け図

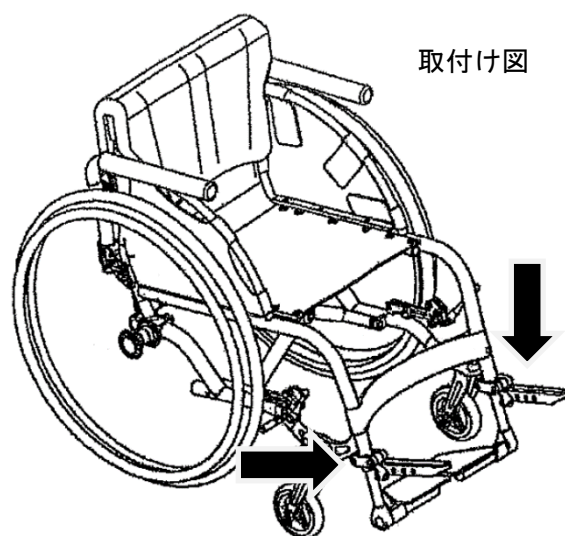


取付け前に

取付けは平坦で安全な場所で行ってください。
車椅子は折りたたみ式の場合は、開いた状態で行ってください。
必ずブレーキをロックし、車椅子が動かない状態で行ってください。


フロントキャリーの取付け方法

本体とクランプを挟み込み、ボルトで固定してください。(ボルトの長さに注意してください)
パイプが $\phi 26\text{mm}$ 以外の場合は、アダプターを使用してください。
※必ず、左右両側に付けて使用してください。

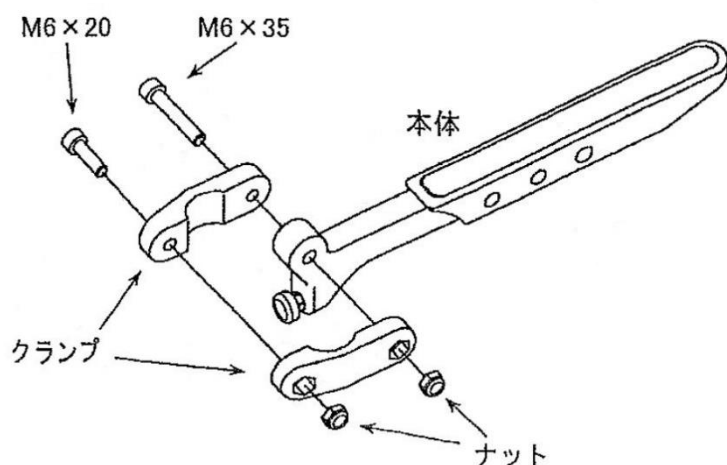

<アダプター>

パイプが $\phi 18$, 20 , 22 の場合

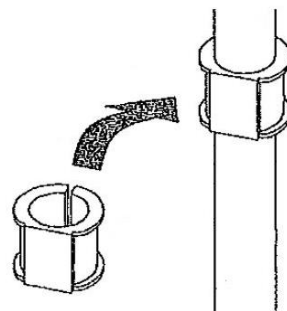



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性があること、および物的損害の発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 取付け後は、フロントキャリアが確実に固定されていることを確認してください。
- 無理に取付けを行うと、使用中に外れたり、積載物を落としたりする恐れがありますので、その場合にはお買い上げいただいた販売店または(株)松永製作所までお問い合わせください。
- この製品は、フロントキャリアとして設計しております。＜耐荷重：左右両方で **10k g**＞その他の目的では使用しないで下さい。

使用方法


<収納>

フロントキャリアを使用しない場合は、上側に跳ね上げることができます。
使用時には、下げてください。




注意

- 必ず左右両側を同時に使用してください。
片側のみで使用すると、積載物の重みでバランスを崩し、転倒する恐れがあります。また、破損の原因となります。

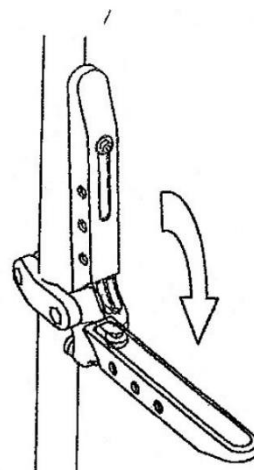

<長さ・角度の調整>

- 長さの調整
固定ボルトをゆるめ、本体を伸縮させます。
三段階に調整が可能です。
調整後は固定ボルトをしっかりと締めてください。
- 角度の調整
ナットをゆるめ、角度調整ボルトを回し
角度を調整してください。
調整後はナットを締めてください。

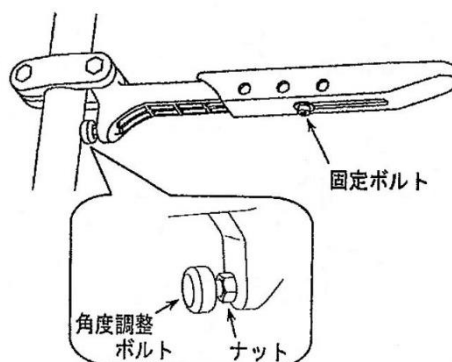

注意

- 必ず左右両側を同じように調整（長さ・角度）してください。
積載物の重みでバランスを崩し、転倒する恐れがあります。また、破損の原因となります。
- 調整後はボルト、ナットをしっかりと締めてください。
使用中に外れ、積載物を落としたり、破損の原因となります。

お手入れ方法

- 清掃する場合は、水につけたタオルを強くしぼり、泥やホコリを拭き取った後、乾いた布で仕上げ拭きをしてください。
- 揮発性剤（シンナー・ベンジン・アルコール類）は使用しないで下さい。（変色・劣化の原因となります。）



株式会社 松永製作所

〒503-1272 岐阜県養老郡養老町大場484
TEL 0584-35-1180(代) FAX 0584-35-1270
URL <http://www.matsunaga-w.co.jp>

2018.05