

ROHO製品カタログ

—
床ずれの心配から
解放されたいあなたへ



permobil



あなたらしく
歩み続けてください。



もくじ

ページ

ロホクッション その背景にある科学 4-6

クッション

セレクトシリーズ 8-9

スマートシリーズ 10-11

ハイブリッドシリーズ 12-13

カスタムクッション 14-15

1バルブ 16-17

2バルブ 18-19

その他のクッション 20-21

特殊機能製品と付属品 22-25

マットレス 27-28

車いす用バックサポートシステム

ROHO・アジリティ・スタンダードシリーズ 30-33

ROHO・アジリティ・アクティブシリーズ 34-35

資料編

採寸の手引き 36-37

クッションサイズ表 38

バックサポートサイズ表 39-40


ご使用とお手入れ 42

返品・保証・品質管理 42

商標 43



ROHO製品 その背景にある科学

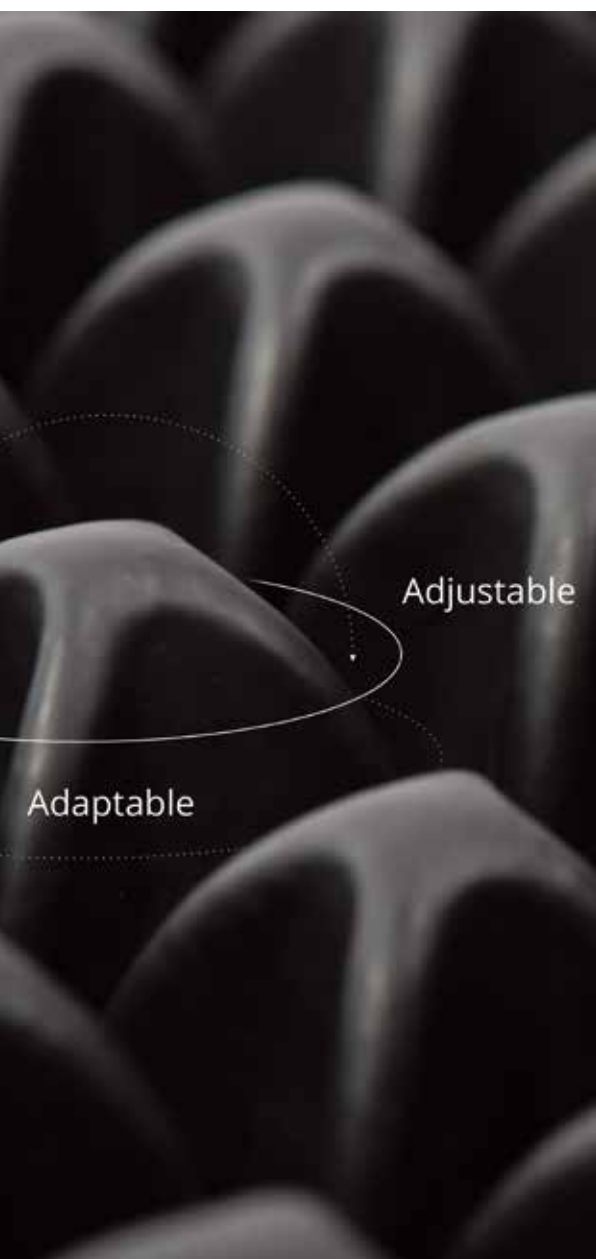

床ずれは痛みを伴うだけでなく、合併症を引き起こす場合があります。また、条件によっては数分から数時間で症状が悪化しますが、早期に気づいて対処することが大切です。

床ずれの根絶をめざし、ROHOが活用する技術のひとつが **ROHO® Shape Fitting Technology®** (ROHO・シェイプフィッティング・テクノロジー) です。ROHO製品独自の「エアセル」は、水が持つ圧力再分配特性を再現し、体型に合わせて自在に形状を適合させる特性を持っています。そのため、床ずれの最大の原因である摩擦やずれが軽減されます。

ROHO・シェイプフィッティング・テクノロジーを搭載した製品は、皮膚の保護や軟部組織へ座位調整が必要な方に、安心と快適さをご提供いたします。

最高の結果を得るために、ぜひROHO製品をご活用ください。

- 皮膚・軟部組織に対する優れた保護力
- より長時間の安全な座位
- ポジショニングと安定性

医学的根拠に基づいた最高のクッションを

ROHOは、40年以上にわたって医師や専門家から支持されてきました。市場における数十年の経験と、90を超える学術研究・臨床試験が、ROHO製品の効果の証です。



製品における科学的根拠の研究数としてはトップクラスです。

100万を超えるROHO製品が70か国以上で使用されています。
安心してご利用いただけます。

DRY FLOATATION® (ドライフローテーション)テクノロジーを搭載しているのはROHO製品だけです。

ドライフローテーション・テクノロジーは軟部組織の変形を最小限に抑え、血行を妨げることなく理想的な環境を提供します。

床ずれ軽減や術後創にROHOクッションが最適であることは、多くの研究から明らかです。

品質と確かな効果が、ペルモビールの礎となる考え方です。ROHO製品が常に最高の結果を実現できるよう、ペルモビールは業界をリードする臨床研究に多くのリソースを投入しています。また、継続的に改善をはかり、業界トップの性能を維持するため、専門家による「Scientific Advisory Board for Pressure Injury (床ずれのための学術諮問委員会)」を設置しました。その取り組みと研究が、社内研修や教育から研究開発に至る当社の原動力になっています。

ROHOクッション:

比較対象として平らなウレタン*と比べ、組織損傷リスクの軽減に高い効果が期待されます**。

41% 体型に順応して変形することにより、体組織ストレスが減少します**

57% 比較対象のウレタン*よりも深い沈み込みを確保して、筋委縮などの廃用性症候群、骨形状の適応、瘻性、肥満、癬痕から体組織を保護します。**

*線形の弾性特性と等方性があり、ポアソン比0.3、弾性係数7ないし10kPaのウレタンを比較対象としています。

**Gefen, et al. (JVT 2014)

ドライフローテーション・テクノロジーの4つの基礎原理

ROHO・ドライフローテーション・テクノロジーは流体静力学(静止した流体を扱う学問)に基づき、4つの原理で皮膚を保護し、快適さを確保しています。


①沈み込みを許す(表面の張力が低い)

特徴:接触時、座面が容易に沈み込む。

当社独自の設計による適度な沈み込みにより、皮膚や軟部組織の圧迫と不快感を取り除きます。



▶動画はこちら

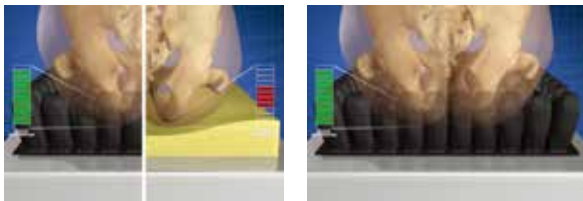


②身体の形状にフィット (常に元の形状に戻ろうとする力)

特徴:流体からの浮力によりすべての接点に均等で一定の力が伝わる。

体の形状は、人それぞれです。ROHOクッションは体の形状や位置の変化に常に追従します。



▶動画はこちら

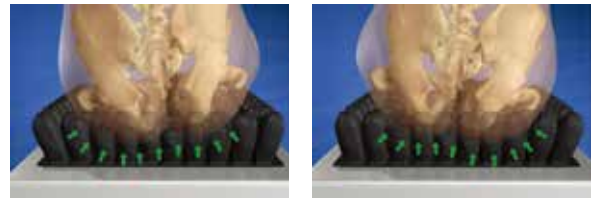


③身体の動きに追従(動きの自由度が高い)

特徴:動きの自由度。

場面を問わず、姿勢にフィットします。エアセルが体の動きに追従し、動きの自由度を損なうことなく体重を支えます。



▶動画はこちら

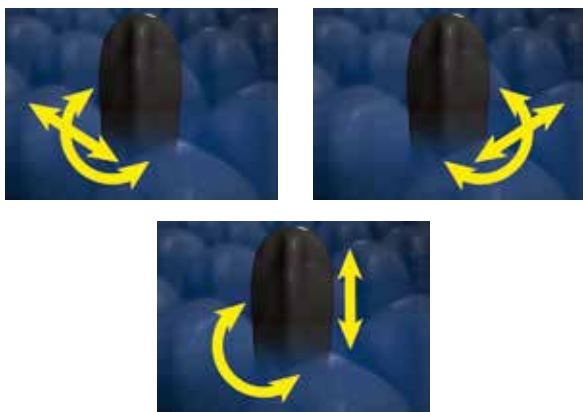


④身体の動きに抗しない (摩擦やせん断の作用が小さい)

特徴:摩擦は動きに抵抗するような2つの面に働く力、せん断はそれぞれ反対に引っ張られるものに生じる作用。ROHOではこれらの作用が小さい。

ROHOクッションは体の動きに追従します。なめらかな表面が、安全性や快適性を損なわずに、摩擦やせん断の作用を軽減します。



▶動画はこちら

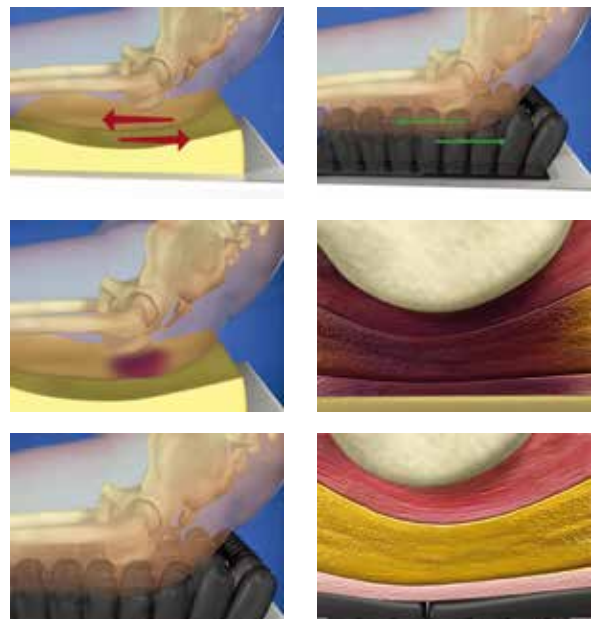



クッション

ROHOクッションはお使いになる方、座る場所を問わず、あなたらしさを実現するために設計されています。当社独自のドライブローテーションテクノロジーが、移動時も常に体の形状に沿い快適な姿勢を維持します。



セレクトシリーズ

スマートシリーズ

ハイブリッドシリーズ

カスタムクッション

1バルブ

2バルブ

その他のクッション製品

特殊機能製品と付属品





セレクトシリーズ

クワドロセレクト および コンツァーセレクト

クッションには独立した4つの空気室があり、当社独自のISO FLO[®](アイソフロー)バルブで制御することによって、それぞれが1人ひとりに適した形状になります。

ROHO・アイソフローバルブ(クッション前部)から、クッションに空気を注入する方法は、以下の2通りです。



アイソフローバルブ「開」
(緑のボタンを押す)

ROHO・1バルブクッション同様、
空気はクッション全体に流れ込みます。




アイソフローバルブ「閉」
(赤のボタンを押す)

空気は4つのセクションに分かれ、
前後左右の座位調整が可能になります。

セレクトシリーズのクッションには、安定性、座位調整機能、快適性、使いやすさを損なうことなく皮膚・軟部組織を保護する機能が標準装備されています。床ずれを軽減することで、治療をサポートします。

QUADTRO SELECT® (クアドトロセレクト)クッション

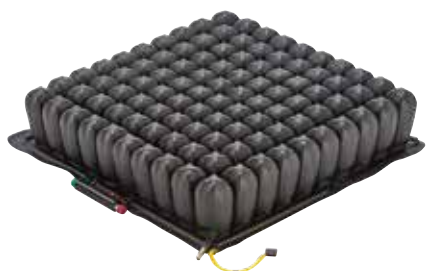

ROHO・クアドトロセレクト ハイタイプ

連結したハイタイプのエアセルが最大限の沈み込みで体を包み、皮膚の保護、座位、安定性、快適性を実現します。

対象となる方*

骨盤のゆがみ(前後または左右7.5cmまで)に対する調整、骨盤または下肢の姿勢調整が必要な方

サイズ

幅:32.5cm ~ 67cm
奥行:30cm~65cm
高さ:10.5cm

保証期間

クッション:36ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重
なし

*あくまで目安として記載しております



ROHO・クアドトロセレクト ミドルタイプ

連結したミドルタイプのエアセルが、座位と安定性のカスタマイズという理想的な組み合わせを叶えます。

対象となる方*

骨盤のゆがみ(前後または左右5cmまで)に対する調整、骨盤または下肢の姿勢調整が必要な方

サイズ

幅:36.5cm ~ 49.5cm
奥行:34.5cm ~ 47cm
高さ:8.5cm

保証期間

クッション:36ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重
なし

*あくまで目安として記載しております



ROHO・クアドトロセレクト ロータイプ

連結したエアセルが安定した座位を提供します。オフィスチェア、スポーツ機材、カーシートなど、クッション機能や保護が必要な場面で、補助用クッションとしても使用できます。

サイズ

幅:28cm ~ 62.5cm
奥行:30cm ~ 56cm
高さ:5.5cm

保証期間

限定クッション:36ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重
なし

CONTOUR SELECT® (ROHO・コンツァーセレクト)クッション



座位と姿勢の調整用に設計されており、クッション中央で安定してまっすぐな座位を維持します。

- 脚部の適正なアライメントと骨盤の安定性を確保
- アイソフローバルブにより、使用する方に合わせた左右、前後方向の細かな調整が可能
- 安定性
- 座位調整

サイズ

幅:36.5cm ~ 62.5cm
奥行:38.5cm ~ 51.5cm
高さ:約5.5cm ~ 10.5cm

保証期間

クッション:36ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重
なし

スマートシリーズ

ROHO・スマートチェック

クッション用電子式パーソナルセキュリティデバイス

使いやすくて便利な、電子式クッションモニタリングシステムです。

セットアップを済ませたスマートチェックをROHOセンサーレディークッションに取り付ければ、チェックボタンを押すだけで空気圧の変化を確認できます。

保証期間:24か月

- 適切な空気圧を記憶
- ボタンを押すだけで空気圧レベルをチェック
- リアルタイムのフィードバック
- リセット可能
- 取り外して保管可能





ROHO・クッションハイ
(スマートチェック用)
1バルブ・スマートチェック用
クッション

※スマートチェックは別売りになります。

連結したハイタイプのエアセルが体を包み、体圧を分散して摩擦やずれを低減します。

高さのあるエアセルによって体との接触面積が大きくなり、たっぷりとした沈み込みと包み込みを提供します。


対象となる方*
骨盤のゆがみ(7.5cmまで)に対する調整が必要な方

サイズ
幅:29 cm ~ 68cm
奥行:29 cm ~ 50.5cm
高さ:10.5cm

保証期間
クッション:24ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重
なし

*あくまで目安として記載しております

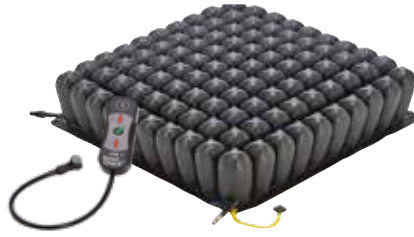

ROHO・クッションミドル
(スマートチェック用)
1バルブ・スマートチェック用
クッション

※スマートチェックは別売りになります。

連結したミドルタイプのエアセルがROHO・ドライブローテーションのシェイプフィッティング・テクノロジーにより理想的な沈み込みと皮膚の保護を可能にします。

エアセルの形状と座面の沈み込みは、常に動作に追従します。

対象となる方*
骨盤のゆがみ(5cmまで)に対する調整が必要な方

サイズ
幅:33.5cm ~ 59.5cm
奥行:33.5cm ~ 50.5cm
高さ:8cm

保証期間
クッション:24ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重
なし

*あくまで目安として記載しております



ROHO・ハイブリッドエリート
(スマートチェック用)
1バルブ・スマートチェック用
クッション

※スマートチェック用は通常仕様の1バルブクッションと兼用になります。また、スマートチェックは別売りになります。

ROHO・ドライブローテーションのシェイプフィッティング・テクノロジーによる最新のクッションは、皮膚・軟部組織保護と、立体成型のウレタンベースによる安定性と座位保持機能を兼ね備えています。

体の形状にフィットするエアクッションが、骨盤に重要な体圧分散を可能にします。

対象となる方*
骨盤のゆがみ(5cmまで)に対する調整、骨盤または下肢の位置調整、移動時の安定性が必要な方

サイズ
幅:35cm ~ 60.5cm
奥行:37.5cm ~ 53cm
高さ:11cm

保証期間
クッション:24ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重
225kg

*あくまで目安として記載しております



ハイブリッドシリーズ

ROHO・ドライブローテーションのシェイプフィッティング・テクノロジーによる皮膚・軟部組織の保護と、立体成型のウレタンベースによる安定性を兼ね備えた最新のクッションです。

立体成型のウレタンベースは、移動時の安定性が向上するよう設計されており、快適性、座位保持、安定性を確保しています。

- さらなる安定性と皮膚・軟部組織の保護のために、エアクッションとウレタンベースを組み合わせました。
- 立体成型のウレタンベースが大腿部の内外側をサポートし、脚を適切な姿勢で保持します。
- 移動の際のしっかりとした基礎となります。
- 床ずれを予防します。





ROHO・ハイブリッドエリート (スマートチェック用)

1バルブクッション

※スマートチェック用は通常仕様の、1バルブクッションと兼用になります。また、スマートチェックは別売りになります。

ROHO・ドライブローテーションのシェイプフィッティング・テクノロジーによる最新のクッションは、皮膚・軟部組織の保護と、立体成型のウレタンベースによる安定性を兼ね備えています。

体の形状に順応するエアクッション部が、骨盤にとって重要な圧力分散を可能にします。

対象となる方*

骨盤のゆがみ(5cmまで)に対する調整が必要な方
骨盤と下肢の座位調整が必要な方
移動時の安定性が必要な方

サイズ

幅:35cm ~ 60cm
奥行:37.5cm ~ 53cm
高さ:11cm

保証期間

クッション:24ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重

225kg

*あくまで目安として記載しております



ROHO・ハイブリッドエリート

2バルブクッション

ROHO・ドライブローテーションのシェイプフィッティング・テクノロジーによる最新のクッションは、皮膚・軟部組織の保護と、立体成型のウレタンベースによる安定性を兼ね備えています。

2つの空気室があるクッションが、骨盤にとって重要な圧力分散を可能にします。

2つの空気室が独立しているため、骨盤の左右方向の傾斜を軽減、または調整することができます。

対象となる方*

骨盤のゆがみ(5cmまで)の調整が必要な方
左右方向の座位調整が必要な方
移動時の安定性が必要な方

サイズ

幅:35.5cm ~ 51cm
奥行:37.5cm ~ 53cm
高さ:11cm

保証期間

クッション:24ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重

225kg

*あくまで目安として記載しております



ネクサススピリット

ROHO・ドライブローテーションテクノロジーと、柔らかい立体成型ウレタンベースを組み合わせました。

ベースは安定性、座位保持機能と移動時の体重支持機能を備え、空気室の一つひとつが体を包み込み、圧力を分散して皮膚・軟部組織の損傷を軽減します。

対象となる方*

骨盤のゆがみ(約2.5cmまで)に対する調整が必要な方
移動時の安定性と支持が必要な方
空気式とウレタンクッションによる座位調整を組み合わせる必要がある方

サイズ

幅:35.5cm ~ 51cm
奥行:39.5cm ~ 49.5cm
空気式マットの高さ:5.5cm
全体の高さ:9cm

保証期間

クッション:24ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重

なし

*あくまで目安として記載しております



カスタムクッション

カスタムメイドのROHOクッションのご提供が可能です。



バルブはご要望の位置に



快適性、安全性、効果の点で、万人に合った万能製品はありません。それを理解している当社は形状、サイズ、機能のすべてをカスタマイズできるROHOクッションを提供しています。

対象となる方*

バルブや空気室の数を変更し、左右、前後のさらに細かな座位調整が必要な方。

エアセルの高さを変え、必要な部位にさらなる安定性と皮膚・軟部組織の保護を確保することで、その効果が期待できる方

標準サイズに対してエアセルの列を増やす、または減らす必要がある方

エアセルを追加または減らす必要がある方

クッションのベースに通風孔やドレーン用の穴を設けることでメリットが得られる方

サイズ
カスタム

保証期間
クッション:24ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重
製品による

カスタムクッションは、ご注文内容に応じて設計・見積りいたします。制限事項は標準品と異なる場合があります。

*あくまで目安として記載しております



1バルブクッション

ドライフローテーション・テクノロジーは体圧を分散して摩擦とずれを軽減します。1バルブシリーズのクッションは体の形状にフィットし、組織の変形を最小限に抑えます。



1バルブ



ROHO・ハイトタイプ

ハイトタイプのアアセルが最大限の沈み込みと包み込みをもたらし、体圧分散によって摩擦とずれを軽減します。

空気圧の調整が簡単で、体の形状にフィットし、組織の変形を最小限に抑えます。

対象となる方*
骨盤のゆがみ(7.5cmまで)に対する調整と調整が必要な方

皮膚の保護、最大限の沈み込みと包み込みが必要な方

サイズ
幅:29cm ~ 68cm
奥行:29cm ~ 63.5cm
高さ:10.5cm

保証期間
クッション:24ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重
なし

*あくまで目安として記載しております



ROHO・ミドルタイプ

ミドルタイプのアアセルが沈み込みと安定性の理想的なバランスを実現します。

体圧を分散し、摩擦とずれを軽減します。空気圧の調整が簡単で、体の形状にフィットし、組織の変形を最低限に抑えます。

対象となる方*
骨盤のゆがみ(5cmまで)に対する調整と調整が必要な方

皮膚の保護、最大限の沈み込みと包み込みが必要な方

サイズ
幅:33.5cm ~ 50.5cm
奥行:33.5cm ~ 50.5cm
高さ:8.5cm

保証期間
クッション:24ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重
なし

*あくまで目安として記載しております



ROHO・ロータイプ

低いアアセルは相互に接続されており、クッション上での動きに伴う摩擦とずれを軽減します。アクティブなライフスタイル向けです。

ロータイプはオフィスチェア、カーシート、シャワー用車いすなど、クッション機能や保護が必要な場面で、補助用クッションとしても使用できます。

サイズ
幅:29cm ~ 59.5cm
奥行:29cm ~ 50.5cm
高さ:5.5cm

保証期間
クッション:24ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重
なし

*あくまで目安として記載しております



2バルブクッション

それぞれに圧力調整が可能な2つの空気室が、皮膚・軟部組織の保護に必要なさらなる安定性をもたらし、ダブルバルブならではの座位調整を可能とします。





ROHO・エンハンサー

高さの異なる空気室を2つのセクション(坐骨と脚を受ける凹み部分と大腿部内外側を支える部分)として配置しています。

これにより骨盤と脚の姿位を保持し、安定性を確保すると同時に、皮膚・軟部組織を適切に保護します。

ROHO・エンハンサーは、坐骨支持部分のアイソレーションが可能な唯一のROHOクッションで、大転子周りの外側の支持を強化しています。

対象となる方*
骨盤と下肢の座位調整が必要な方


サイズ
幅:37.5cm ~ 50.5cm
奥行:37.5cm ~ 50.5cm
高さ:5.5cm ~ 10.5cm
(空気室の高さは部位により異なります)

保証期間
クッション:24ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重
なし

*あくまで目安として記載しております

ハイタイプ、ロータイプの2バルブクッションは左右の空気圧を個々に調整でき、左右方向の骨盤のゆがみや傾斜も調整できます。その結果、床ずれの軽減に加え、より優れた座位調整と安定性を実現しています。

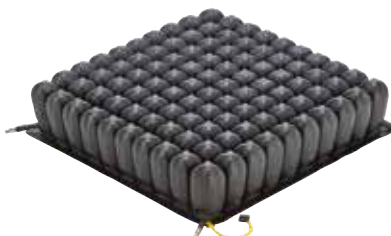

ROHO・ハイタイプ (2バルブ)

ハイタイプ(2バルブ)クッションは2つの空気室の空気圧をそれぞれ調整でき、左右方向のゆがみ(骨盤傾斜など)に対応した座位調整でいっそうの安定性がえられます。

対象となる方*
骨盤のゆがみ(7.5cmまで)の調整または調整が必要な方
外側からの支持を強化したい方
坐骨結節の負荷を部分的に分散する必要がある方

サイズ
幅:37.5cm ~ 50.5cm
奥行:37.5cm ~ 55cm
高さ:10.5cm

保証期間
クッション:24ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重
なし

*あくまで目安として記載しております



ROHO・ロータイプ (2バルブ)

骨盤や姿勢にトラブルを抱えている場合に、クッション座面全体で安定性がえられます。

左右に体を動かすことが多い、活動レベルの高い方向けに設計された製品です。

オフィスチェア、スポーツ機材、カーシート、シャワー用車いすなど、さらなるクッション機能と保護が必要な場面で使用できます。

サイズ
幅:37.5cm ~ 50.5cm
奥行:37.5cm ~ 50.5cm
高さ:5.5cm

保証期間
クッション:24ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重
なし



その他のクッション製品

一人ひとりに適したソリューションをご提供できるように、ペルモビールではさまざまな製品をご用意しております。



AIR FLOATATION air insert built into the AirLITE® cushion.

ROHO・エアライト3

エアライトはメンテナンスフリーのクッションです。柔らかく、快適な使用感を生み出すウレタンベースにエアフローレーション空気式クッション(調整不可)が組み込まれているため、体の形状にフィットし車いすからの転落を軽減します。脚部の適度な凹みが、適切な姿勢を保持します。

- メンテナンスフリー
- 座位保持
- 快適性
- 安定性
- 軽量

対象となる方*
骨盤と下肢の座位調整が必要な方

サイズ
幅:33cm ~ 51cm
奥行:33cm ~ 51cm
高さ:5cm ~ 9.5cm

保証期間
クッション:24ヶ月

耐荷重
136kg

*あくまで目安として記載しております



ROHO・モザイククッション

新たな発想で再設計されたコストパフォーマンスの高いモザイククッション。皮膚・軟部組織の保護と同時に、いっそう快適な使用感がえられます。

なめらかな形状と、より効果的な空気流を追求したことにより、違和感を和らげ、より長時間お使いいただけます。

ROHOのエアセルテクノロジーを実感していただけるでしょう。

モザイククッションの斬新なデザインが、快適な沈み込みと、完璧なフィット感を可能にしています。さまざまな座面に対応できるようサイズ展開も豊富です。皮膚・軟部組織の保護を提供します。

対象となる方*
骨盤と下肢の座位調整が必要な方

サイズ
幅:41.5cm ~ 51.5cm
奥行:41.5cm ~ 46.5cm
高さ:約6.5cm ~ 7.5cm

保証期間
クッション:12ヶ月

耐荷重
143kg

*あくまで目安として記載しております



バケーションクッション

長時間、快適に座るための汎用クッションです。

軽量で折り畳めるため、これまでになく手軽さと快適性を両立しています。エアセル同士が連結しているため、体重が移動しても、空気が移動して体圧を分散してくれます。

カバーは、キルティングカバーとULTRALEATHER® (ウルトラレザー)カバーの2種類からお選びいただけます。

サイズ
幅:45.5cm
奥行:40.5cm
高さ:2.5cm ~ 5.5cm
重量:0.2kg
保証期間
クッション:12ヶ月



特殊機能製品と付属品

車いすから離れても、床ずれリスクがなくなるわけではありません。

どこにいても保護できるように、ペルモビールでは、すぐれた特殊機能製品を開発しました。

ROHO・トイレシート

ROHO・シャワー・トイレクッション

ROHO・アダプター

ROHO・ミニマックス

ROHO・ソリッドインサート



ROHO・トイレシート

調整可能な空気充填式エアセルデザインのカッションです(ネオプレン製)。トイレ(ポータブル含む)での一時的な使用を目的としており、取り付けやお手入れ、消毒も簡単です。

- 簡単取り付け
- 調整可能
- お手入れと消毒が容易

サイズ
幅:20cm
奥行:40cm
高さ:5.5cm
重量:0.5kg

保証期間
クッション:24ヶ月
耐荷重
なし



ROHO・シャワー・トイレクッション

ROHO独自のドライフローテーション・テクノロジーを搭載したシャワー・トイレクッション(調整可能)はポータブルトイレ、入浴用車いすに最も必要とされるクッション機能と保護を実現します。カバーなしで使用できるように設計されており、お手入れや消毒も簡単です。

- お手入れと消毒が容易

サイズ
幅:37.5cm ~ 46.5cm
奥行:37.5cm ~ 46.5cm
高さ:5.5cm
重量:0.7kg

保証期間
クッション:24ヶ月
耐荷重
なし



ROHO・アダプター

平らな面、凹凸のある面のどちらでも、クッション機能と保護機能のある環境に変えられます。エアセル同士は連結されておらず、さまざまな部位の圧迫対策にご活用いただけます。アームレスト、トレー、フットレストなどに合わせ、切り取ってご使用いただけます。

- 独立したエアセル
- 切り取り可能
- 衝撃吸収

サイズ
幅:25cm
奥行:34cm
高さ:2cm
重量:0.2kg

保証期間
24ヶ月
耐荷重
なし



ROHO・プライバシーシールド

車いすの座面から背もたれの下部までを覆います。

ROHO・プライバシーシールドは、車いすの支柱に直接取り付ける点で他社製品とは異なり、ほとんどの車いすにお使いいただけます。取り外しと取り付け、お手入れが簡単です。

保証期間
6ヶ月



ROHO・ミニマックス

レクリエーション、スポーツ、入浴、移動など、短時間での使用を目的として設計されています。衝撃を吸収し、皮膚を保護します。空気圧は調整可能です。

- 快適性

サイズ
幅:38.5cm ~ 46.5cm
奥行:37.5cm ~ 40.5cm
高さ:3cm
重量:0.9kg

保証期間
クッション:24ヶ月
カバー:6ヶ月
耐荷重
なし



ROHO・ソリッドインサート

ROHOクッションのしっかりとした基盤となります。

座位調整に必要な体重支持機能があります。カバ材の合板にポリウレタン樹脂をコーティングしました。わずか0.3cmと、クッションと合わせてカバーに入れやすい厚さです。

- スリングシートの垂れ下がり軽減

保証期間
クッション:12ヶ月



ROHO・スタンダードシリーズ・セレクトシリーズクッション交換用カバー

クッションの保護を目的としています。上部は伸縮可能、サイドには立体構造で編みこまれた生地(スパーサーアブリック)を使用し、ファスナーが付属、底面には滑り止め加工を施しています。クッションをしっかりと車いすに固定する面ファスナーが付属します。

保証期間
6ヶ月

備考:セレクトシリーズのカバーにはアイソフローバルブ用の開口部があります。



ROHO・ヘビーデューティークッションカバー

クッションの保護を目的とし、耐水性を備えたカバーです。上部は伸縮可能で耐水性があり、サイドにはファスナー、底面には滑り止め加工を施しています。クッションをしっかりと車いすに固定する面ファスナーが付属します。

ROHO・ヘビーデューティークッションカバーは以下のような方にお勧めします。

- より高い耐久性が必要な方
- 失禁対策が必要な方
- オゾン発生器等に晒される環境での使用

保証期間
6ヶ月

ROHO標準カバー・高耐久性カバーに対応するクッション。

ROHO・1バルブまたは2バルブクッション:

- ROHO・ハイタイプ
- ROHO・ミドルタイプ
- ROHO・ロータイプ
- ROHO・クッション ハイ(スマートチェック用)
- ROHO・クッション ミドル(スマートチェック用)
- ROHO・エンハンサー
- ROHO・モザイククッション

ROHO・セレクトシリーズカバー:

- ROHO・クアドロセレクト ハイタイプ
- ROHO・クアドロセレクト ミドルタイプ
- ROHO・クアドロセレクト ロータイプ
- ROHO・コンツァーセレクト

備考:セレクトシリーズ(スタンダード)のカバーには、アイソフローバルブ用の開口部があります。

交換用カバー:

ROHO・1または2バルブクッション:

- ROHO・ハイブリッドエリート
- ROHO・ハイブリッドエリート(スマートチェック用)
- ROHO・ネクサススピリットクッション
- ROHO・ミニマックスクッションカバー
- ROHO・パッキングクッションカバー
- ROHO・エアライト3クッション
- ROHO・バケーションクッション

ROHO・ポケット付きクッションカバー

鍵、財布、めがねなどを入れられるポケット付き。

手の届く範囲に小物を収納することができます。特注品のため、お届けまでに3~4週間かかる場合があります。



欲しい クッションは 見つかりましたか？

ペルモビールは、心地よいフィット
を追求しつづけます。



マットレス製品

空気式マットレスは、病院、長期療養、自宅での介護などで皮膚・軟部組織の保護に効果的です。

連結した調整可能なエアセルが体の形状にフィットし、組織の変形を最小限に抑えます。ROHOマットレスは電源不要で、停電時や電源が確保できない状況下においても空気圧と保護機能を維持できます。

ROHO・ドライフローテーション マットレスシステム

ドライフローテーション・マットレスは流体の圧力分散特性を再現し、床ずれの軽減と治療に理想的な環境を提供します。

電動ポンプを使用していないため、騒音、熱、振動が発生しません。マットレスはモジュラー構造になっており、4つの空気室の圧力をそれぞれ調整できます。

- 体型変化に応じて調整可能
- ドレイン孔付き
- 7cmの沈み込み
- 独立した4つの空気室

対象となる方*

皮膚・軟部組織や深部組織の組織破壊のリスクがある方
床ずれの軽減と治療が必要な方
マットレスのカスタマイズが必要な方

サイズ

幅:386cm
奥行:190.5cm
高さ:8.5cm
重量:14.5kg


保証期間

マットレス:24ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重

なし

*あくまで目安として記載しております

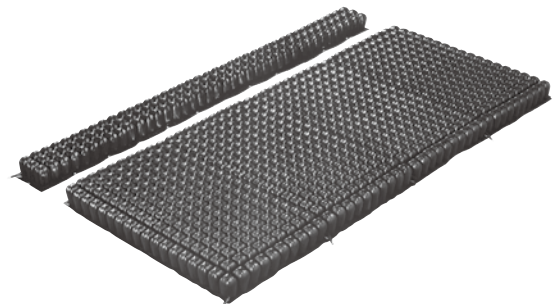

ROHO・ドライフローテーション 大きなサイズ対応キット

大型のベッドに合わせ、ドライフローテーション・マットレスの幅を拡大する追加用マットレスです。

サイズ

190.5cm x 100.5cm x 8.5cm
190.5cm x 105.5cm x 8.5cm
190.5cm x 123cm x 8.5cm
190.5cm x 138.5cm x 8.5cm
190.5cm x 152.5cm x 8.5cm
カスタムサイズもございます。

保証期間

マットレス:24ヶ月

耐荷重

なし



ROHO・ソフレックス2 マットレスシステム

調整可能なエアフローテーションエアセルは体の形状にフィットし、マットレス表面全体に体圧を分散します。ご使用になる方に合わせ、独立した3つの空気室をそれぞれ調整することができます。

電動ポンプを使用していないため、騒音、熱、振動が発生しません。

ポリウレタン製のソフレックス2マットレスは、マットレスカバーまたはリユーズブルカバーと合わせてご使用いただけます。

- 体型変化に合わせて調整可能
- 7.5cmの沈み込み
- 体位に合わせて調整
- お手入れが簡単

対象となる方*
マットレスのカスタマイズが必要な方
皮膚・軟部組織や深部組織の組織破壊のリスクがある方

サイズ
幅:91.5cm
奥行:207.5cm
高さ:9cm
重量:2.9kg

保証期間
マットレス:18ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重
150kg

*あくまで目安として記載しております



ROHO・プロディジー マットレスシステム

独立した3つの空気室はそれぞれ調整でき、さまざまなニーズに対応します。連結した柔らかいエアフローテーションエアセルが体の形状にフィットし、皮膚・軟部組織と深部組織を保護します。

電動ポンプを使用していないため、騒音、熱、振動が発生しません。

底面には水抜き用の孔があり、身体の周りに液体がたまりません。

- 体型変化に合わせて調整可能
- 7.5cmの沈み込み
- お手入れと修理が簡単
- PVC製(DEHP不使用)

対象となる方*
皮膚・軟部組織の組織破壊のリスクがある方

サイズ
幅:91.5cm
奥行:207.5cm
高さ:9cm
重量:4.3kg

保証期間
マットレス:12ヶ月

耐荷重
136kg

*あくまで目安として記載しております



車いす用 バックサポート システム



AGILITY® (アジリティ)車いすバックサポートシステムは、体の形状とそれぞれのニーズに合うよう設計されており、ほとんどの車いすに取り付けることができます。

ROHO・アジリティ・スタンダードシリーズ

ROHO・アジリティ・アクティブシリーズ





ROHO AGILITY® (ROHO・アジリティ) スタンダードシリーズ

行き先を問わず、アジリティはしっかりと背中を支えます。軽量で耐久性が高い航空機グレードのアルミ材を使用したシェルとエアフローレーションインサートが安定性、保護、快適性を実現しています。

アジリティ・マックスコンツアーバックサポート

アジリティ・ミッドコンツアーバックサポート

アジリティ・ミニマムコンツアーバックサポート

アジリティ・カスタムバックサポート



ROHO・エアフローレーション・テクノロジー

ROHO・アジリティバックサポートは軽量で、体にフィットするように設計されており、ROHOのエアフローレーション・テクノロジーが搭載されています。空気式インサートは好みの快適性や姿勢保持の必要性に応じて調整可能です。



Flip-a-bility(回転可能)

- さまざまな体形にフィット
- 体幹と肩幅に合わせて回転
- さまざまな姿勢の必要性に合わせて、角度、奥行、幅、高さを細かく調整可能

アジリティ取付金具

ROHO・アジリティバックサポートには、取付金具(調整可能:2種、調整不可:1種)をご用意しています。クイックリリースタイプと固定タイプは、取り付け後にどちらも同じように調整できます。



クイックリリースタイプ

移動や保管時にワンタッチで取り外しができるため、手の機能に制限がある方でも簡単に扱えます。ロックを外し、ハンドルを持ち上げるだけです。



固定タイプ

背もたれクッションを取り外すことがほとんどない場合に、すっきりとした取り付けが可能です。



直接取り付けタイプ

ペルモビール電動車いす専用*で、アジリティ・アルミニウムシリーズに対応しています。

*コルプス3Gシートを装備し、耐荷重が136kg以下の、互換性があるペルモビール電動車いすに取り付けることができます。

クイックリリースタイプと固定タイプは軽さと強度を両立するZytel®樹脂(DuPont™)製です。機械的強度と耐摩耗性が高く、耐薬品性や耐火性にも優れています。

クイックリリースタイプと固定タイプは、136kgfの力を10万回加えても破壊されず、位置がずれることもありませんでした。アジリティは、主な他社製品の1000倍(回数にして)の耐久性を誇ります。



ROHO・アジリティマックス コンツアーバックサポート

アジリティマックスは体側と背中をしっかり支え、最適な姿勢と安定性を確保します。

両側のエアパッドはそれぞれ調整可能で、より優れた体位調整と快適性を実現しています。

オプション:

- エアインサート付きウレタン
- エアインサート付きウレタン+腰部支持

サイズ
幅:33cm ~ 51cm
奥行:18c(エアインサートを含む)
長さ:40.5cm ~ 51cm
重量:2.0kg ~ 3.0kg

保証期間
バックシェルと取り付け金具:5年間
エアインサート:18ヶ月
カバーとウレタン部分:18ヶ月
カスタムエアインサート:36ヶ月

耐荷重
136kg

ROHO・アジリティミッド コンツアーバックサポート

背中もしっかり、体側はやさしく支えます。

他のすべてのアジリティシリーズ同様、取り付けや調整が簡単で、角度、奥行、幅、高さは座ったままで調整できます。

オプション:

- エアインサート付きウレタン
- エアインサート付きウレタン+腰部支持

サイズ
幅:33cm ~ 51cm
奥行:10cm
長さ:25.5cm ~ 51cm
重量:1.1kg ~ 2.8kg

保証期間
バックシェルと取り付け金具:5年間
エアインサート:18ヶ月
カバーとウレタン部分:18ヶ月
カスタムエアインサート:36ヶ月

耐荷重
136kg

ROHO・アジリティミニマム コンツアーバックサポート

耐久性の高い快適な背もたれとして、基本的な姿勢維持を実現します。

高さは10cmまで、奥行は2.5cmまで、座ったまま調整できます。また、前後15度まで傾斜させることができます。

オプション:

- ウレタンのみ
- 腰部支持付きウレタン
- エアインサート付きウレタン
- エアインサート付きウレタン+腰部支持

サイズ
幅:33cm ~ 51cm
奥行:6.5cm(ウレタン部分)
7.5cm(ウレタン・空気マット)
長さ:25.5 cm ~ 45.5cm
重量:1.1kg ~ 2.3kg

保証期間
バックシェルと取り付け金具:5年間
エアインサート:18ヶ月
カバーとウレタン部分:18ヶ月
カスタムエアインサート:36ヶ月

耐荷重
136kg



ROHO・アジリティ・ラテラル

体幹支持と座位調整をさらに強化するために設計されました。アジリティミニマムコンツァーとミッドコンツァーバックサポートシステムのすべてのサイズに適合しています。

スイングタイプブラケットと固定タイプブラケットがあり、平面でも、段差面でも取り付けられます。

- スイングタイプブラケットは、ウレタンパッドとカバーがついたベース部分が曲がりません。
- 固定タイプは、ウレタンパッドとカバーがついたベース部分は曲がりません。

個別に注文いただけますので、車いすに移乗する側をスイングタイプ、もう一方を固定タイプにすると、乗り降りが楽になります。



アジリティ・ヘッドレストアダプタープレート

以下のセンターボルト規格およびねじ穴間隔の社外品ヘッドレストに対応します。

①ねじの規格: 1/4"-20

- ねじ穴間隔(横): 1", 7/8", 2", 3"
- ねじ穴間隔(縦): 2"

②ねじの規格: M6 (1.0)

- ねじ穴間隔(横): 1", 2"
- ねじ穴間隔(縦): 2"

本製品は、社外品のヘッドレストを当社のアジリティバックサポート製品と併用できるようにするためのものです。




ROHO・アジリティ・カスタムバックサポート

体型やニーズは、一人ひとり異なります。ペルモビールでは、体型や姿勢維持のニーズに合わせた適切なサイズと構成部品を選ぶカスタマイズプロセスを採用しています。

アジリティ・カスタムバックサポートは、すべてのサイズの背もたれに対応し、快適性、体重支持、姿勢保持の点でそれぞれのニーズに合わせ、さまざまな寸法のエアセル(ドライフローテーション・テクノロジー搭載)でご用意いたします。空気圧を制御し、さらなる座位調整を実現するため、1バルブ、マルチバルブのオプションも追加できます。

- バルブと空気室の数をカスタマイズ
- セルを次の高さでカスタマイズ:
3cm
5.5cm
8.5cm
10.5cm
- セルまたはセクションは取り外しできます。

保証期間
バックシェルと取り付け金具:5年間
エアインサート:18ヶ月
エアインサート:36ヶ月
カバーとウレタン部分:18ヶ月

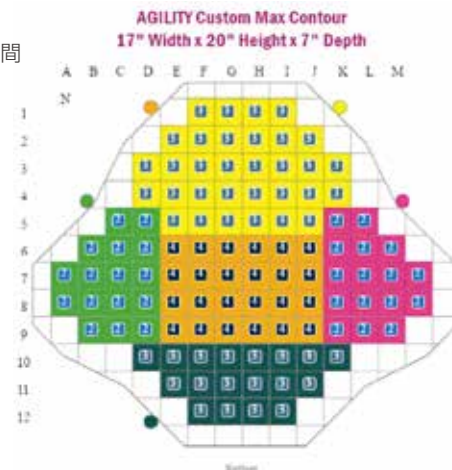



ROHO・アジリティ・アクティブ シリーズ

軽量タイプのアジリティ・アクティブシリーズは、高い強度と最先端のデザインを組み合わせた製品です。

高精度加工と、快適性を体現した斬新なデザイン。アクティブライフをしっかりとサポートします。アクティブシリーズに一体化されたシングルクランプは、シンプルでありながら、他の多くの背もたれに比べてコンパクトで軽量、かつ丈夫です。

アジリティ・アルミニウム・ミニマムコンツァーバックサポート

アジリティ・アルミニウム・ミッドコンツァーバックサポート

アジリティ・カーボン・ミニマムコンツァーバックサポート

アジリティ・カーボン・ミッドバックサポート

圧縮成型により、コンパクトながら強さを兼ね備えた最新のシェル。

回転させることで、高度な快適性を損なわずにさまざまな体形に合わせられます。アジリティ・アクティブが一体化された製品は、片側側面に単ークランプだけで固定され、小型軽量でスッキリとした外観と、他の製品をしのぐ強度を両立しています。



オプション:

- ウレタンのみ(アルミニウム)
- エアインサート+ウレタン(カーボン)



アジリティ・アルミニウム・ミニマム / ミッド コンツァーバックサポート

サイズ
幅:35.6cm ~ 45.7cm
奥行:ミニマムー 7.5cm
ミッドー 10cm
長さ:20.3cm ~ 25.5cm
重量:0.9Kg ~ 1.4kg (取り付け金具を含む)

保証期間
バックシェルと取り付け金具:5年間
カバーとウレタン部分:18ヶ月

耐荷重
120.2kg

アジリティ・カーボン・ミニマム / ミッド コンツァーバックサポート

サイズ
幅:35.6cm ~ 45.7cm
奥行:ミニマムー 7.5cm
ミッドー 10cm
長さ:25.5cm ~ 40.5cm
重量:0.815kg
(35.5 cm x 25.5cm の場合。重量は取り付け金具を含む)

保証期間
バックシェルと取り付け金具:5年間
カバーとウレタン部分:18か月
ウレタンエアインサート:18ヶ月

耐荷重
120.2kg

採寸の手引き



クッションの厚み

標準の空気圧まで空気を充填し、上下、左右に負荷をかけず、シエルがない状態でのクッションの厚みです。

寸法は製品の説明書と製品のラベルにも記載されている場合があります。



クッションの幅

クッションの左右の両端に負荷をかけずに測った寸法です。

寸法は製品の説明書と製品のラベルにも記載されている場合があります。



クッションの奥行

クッションの前後の両端に負荷をかけずに測った寸法です。

寸法は製品の説明書と製品のラベルにも記載されている場合があります。



座幅


クッションの使用に適した座面の幅です。




座奥

クッションの使用に適した座面の奥行です。

クッションの幅と奥行

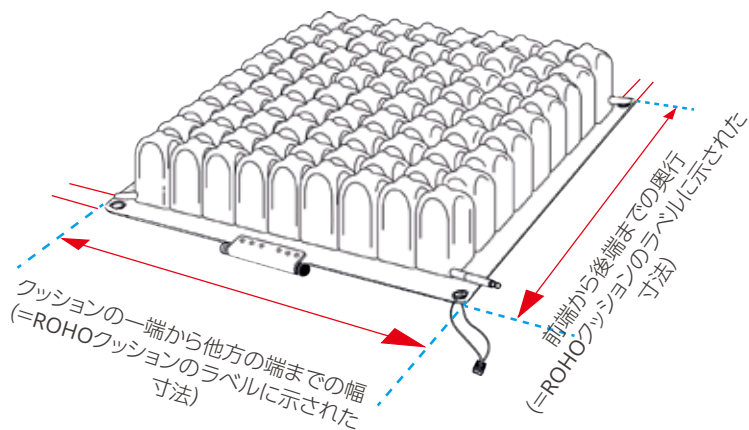

座幅と座奥
セレクトシリーズ クッション

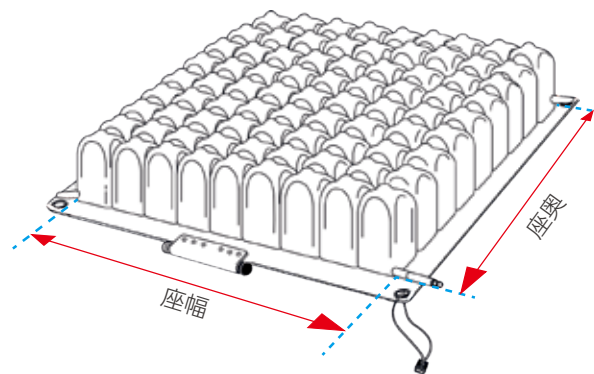

備考:耐荷重がないクッションは、ご使用になる方に適した正しいサイズをご使用ください。

車いすに適した、正しいサイズの ROHOクッションをご使用ください。

ステップ1

車いすの座面の幅と奥行を測ります。
備考:メーカーが公表する座面の寸法とは異なる場合があります。

ステップ2

以下の表と車いすの座面の寸法を照らし合わせて、適切なエアセルの数を判断します。

ネオプレン製ROHOクッションのサイズ選定表


車いすの寸法 (cm)	エアセルの数
22cm ~ 26.5cm	5
26.5cm ~ 31cm	6
31cm ~ 35cm	7
35cm ~ 39.5cm	8
39.5cm ~ 44cm	9
44cm ~ 48.5cm	10
48.5cm ~ 52.5cm	11
52.5cm ~ 57cm	12
57cm ~ 61cm	13
61cm ~ 65.5cm	14
65.5cm ~ 70cm	15

※この表は、以下の製品のサイズ選定にご利用いただけます。


- ・ ROHOクッション ハイ/ミドル/ロー
- ・ ROHOクッションスマートチェック用 ハイ/ミドル
- ・ ROHOクアドトロセレクト ハイ/ミドル/ロー
- ・ ROHOコンツァーセレクト
- ・ ROHOエンハンサー

備考:モデルによっては、表に示されたエアセル数のクッションをご用意できない場合があります。

1バルブクッション

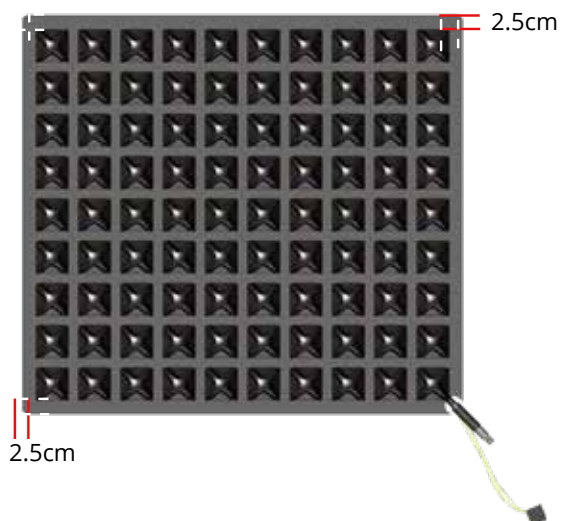

セレクトシリーズクッション

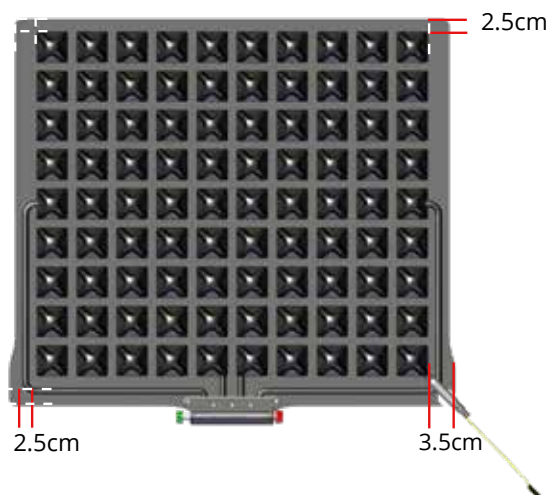

クッションサイズ表(座幅 × 座奥)

ハイブリッドエリートSRクッション

型番	サイズ (in.)	サイズ (cm)
1RHE1414C-SR	14" x 14"	35.5 x 35.5
1RHE1415C-SR	14" x 15"	35.5 x 38
1RHE1416C-SR	14" x 16"	38 x 40.5
1RHE1515C-SR	15" x 15"	38 x 38
1RHE1516C-SR	15" x 16"	38 x 40.5
1RHE1517C-SR	15" x 17"	38 x 43
1RHE1615C-SR	16" x 15"	40.5 x 38
1RHE1616C-SR	16" x 16"	40.5 x 40.5
1RHE1617C-SR	16" x 17"	40.5 x 43
1RHE1618C-SR	16" x 18"	40.5 x 45.5
1RHE1620C-SR	16" x 20"	40.5 x 51
1RHE1716C-SR	17" x 16"	43 x 40.5
1RHE1717C-SR	17" x 17"	43 x 43
1RHE1718C-SR	17" x 18"	43 x 45.5
1RHE1816C-SR	18" x 16"	45.5 x 40.5
1RHE1817C-SR	18" x 17"	45.5 x 43
1RHE1818C-SR	18" x 18"	45.5 x 45.5
1RHE1820C-SR	18" x 20"	45.5 x 51
1RHE2017C-SR	20" x 17"	51 x 43
1RHE2018C-SR	20" x 18"	51 x 45.5
1RHE2020C-SR	20" x 20"	51 x 51
1RHE2218C-SR	22" x 18"	56 x 45.5
1RHE2220C-SR	22" x 20"	56 x 51
1RHE2222C-SR	22" x 22"	56 x 56
1RHE2418C-SR	24" x 18"	61 x 45.5
1RHE2420C-SR	24" x 20"	61 x 51

エアライトクッション

型番	サイズ (in.)	サイズ (cm)
AL1313HD	13" x 13"	33 x 33
AL1315HD	13" x 15"	33 x 38
AL1414HD	14" x 14"	36 x 36
AL1416HD	14" x 16"	36 x 41
AL1515HD	15" x 15"	38 x 38
AL1517HD	15" x 17"	38 x 43
AL1616HD	16" x 16"	41 x 41
AL1618HD	16" x 18"	41 x 46
AL1717HD	17" x 17"	43 x 43
AL1718HD	17" x 18"	43 x 46
AL1720HD	17" x 20"	43 x 51
AL1816HD	18" x 16"	46 x 41
AL1818HD	18" x 18"	46 x 46
AL1820HD	18" x 20"	46 x 51
AL1917HD	19" x 17"	48 x 43
AL1919HD	19" x 19"	48 x 48
AL2017HD	20" x 17"	51 x 43
AL2018HD	20" x 18"	51 x 46

ハイブリッドエリート・ダブルバルブクッション

型番	サイズ (in.)	サイズ (cm)
2RHE1414C	14" x 14"	36 x 36
2RHE1415C	14" x 15"	36 x 38
2RHE1416C	14" x 16"	36 x 41
2RHE1515C	15" x 15"	38 x 38
2RHE1516C	15" x 16"	38 x 41
2RHE1517C	15" x 17"	38 x 43
2RHE1615C	16" x 15"	41 x 38
2RHE1616C	16" x 16"	41 x 41
2RHE1617C	16" x 17"	41 x 43
2RHE1618C	16" x 18"	41 x 46
2RHE1620C	16" x 20"	41 x 51
2RHE1716C	17" x 16"	43 x 41
2RHE1717C	17" x 17"	43 x 43
2RHE1718C	17" x 18"	43 x 46
2RHE1816C	18" x 16"	46 x 41
2RHE1817C	18" x 17"	46 x 43
2RHE1818C	18" x 18"	46 x 46
2RHE1820C	18" x 20"	46 x 51
2RHE2017C	20" x 17"	51 x 43
2RHE2018C	20" x 18"	51 x 46
2RHE2020C	20" x 20"	51 x 51

ネクサススピリットクッション

型番	サイズ (in.)	サイズ (cm)
NS1414C	14" x 14"	36 x 36
NS1416C	14" x 16"	36 x 41
NS1515C	15" x 15"	38 x 38
NS1616C	16" x 16"	41 x 41
NS1618C	16" x 18"	41 x 46
NS1717C	17" x 17"	43 x 43
NS1816C	18" x 16"	46 x 41
NS1818C	18" x 18"	46 x 46
NS2018C	20" x 18"	51 x 46

ROHO・アジリティ・スタンダードシリーズサイズ表

インサートをご注文の際は、品番の「#」を以下の文字に読み替えてください。

- F - 立体成型ウレタンのみ
- FL - ウレタン+腰部支持
- A - 空気マットのみ
- AL - 空気マット+腰部支持

取り付け金具をご注文の際は、モデル品番の「X」を以下の数字に読み替えてください。

- 1 - クイックリリースタイプ
- 2 - 固定タイプ

備考:高さが40.5cmを超える固定タイプはありません。

ミニマムコンツァー(AG2)

型番	車いすのサイズ (in.)	車いすのサイズ (cm)
AG2-1410#-X	13" - 14"	33 - 35.5
AG2-1413#-X	13" - 14"	33 - 35.5
AG2-1416#-X	13" - 14"	33 - 35.5
AG2-1418#-X	13" - 14"	33 - 35.5
AG2-1510#-X	14" - 15"	35.5 - 38
AG2-1513#-X	14" - 15"	35.5 - 38
AG2-1516#-X	14" - 15"	35.5 - 38
AG2-1518#-X	14" - 15"	35.5 - 38
AG2-1610#-X	15" - 16"	38 - 40.5
AG2-1613#-X	15" - 16"	38 - 40.5
AG2-1616#-X	15" - 16"	38 - 40.5
AG2-1618#-X	15" - 16"	38 - 40.5
AG2-1710#-X	16" - 17"	40.5 - 43
AG2-1713#-X	16" - 17"	40.5 - 43
AG2-1716#-X	16" - 17"	40.5 - 43
AG2-1718#-X	16" - 17"	40.5 - 43
AG2-1810#-X	17" - 18"	43 - 45.5
AG2-1813#-X	17" - 18"	43 - 45.5
AG2-1816#-X	17" - 18"	43 - 45.5
AG2-1818#-X	17" - 18"	43 - 45.5
AG2-1910#-X	18" - 19"	45.5 - 48.5
AG2-1913#-X	18" - 19"	45.5 - 48.5
AG2-1916#-X	18" - 19"	45.5 - 48.5
AG2-1918#-X	18" - 19"	45.5 - 48.5
AG2-2010#-X	19" - 20"	48.5 - 51
AG2-2013#-X	19" - 20"	48.5 - 51
AG2-2016#-X	19" - 20"	48.5 - 51
AG2-2018#-X	19" - 20"	48.5 - 51

ミッドコンツァー(AG3)

空気マットのみ(A)、空気マット+腰部支持(AL)タイプのインサートのみがございませす。

型番	車いすのサイズ (in.)	車いすのサイズ (cm)
AG3-1410#-X	13" - 14"	33 - 35.5
AG3-1413#-X	13" - 14"	33 - 35.5
AG3-1416#-X	13" - 14"	33 - 35.5
AG3-1418#-X	13" - 14"	33 - 35.5
AG3-1510#-X	14" - 15"	35.5 - 38
AG3-1513#-X	14" - 15"	35.5 - 38
AG3-1516#-X	14" - 15"	35.5 - 38
AG3-1518#-X	14" - 15"	35.5 - 38
AG3-1520#-X	14" - 15"	38 - 40.5
AG3-1610#-X	15" - 16"	38 - 40.5
AG3-1613#-X	15" - 16"	38 - 40.5

AG3-1616#-X	15" - 16"	38 - 40.5
AG3-1618#-X	15" - 16"	38 - 40.5
AG3-1620#-X	15" - 16"	38 - 40.5
AG3-1710#-X	16" - 17"	40.5 - 43
AG3-1713#-X	16" - 17"	40.5 - 43
AG3-1716#-X	16" - 17"	40.5 - 43
AG3-1718#-X	16" - 17"	40.5 - 43
AG3-1720#-X	16" - 17"	40.5 - 43
AG3-1810#-X	16" - 17"	43 - 45.5
AG3-1813#-X	17" - 18"	43 - 45.5
AG3-1816#-X	17" - 18"	43 - 45.5
AG3-1818#-X	17" - 18"	43 - 45.5
AG3-1910#-X	18" - 19"	45.5 - 48.5
AG3-1913#-X	18" - 19"	45.5 - 48.5
AG3-1916#-X	18" - 19"	45.5 - 48.5
AG3-1918#-X	18" - 19"	45.5 - 48.5
AG3-1920#-X	18" - 19"	45.5 - 48.5
AG3-2010#-X	19" - 20"	48.5 - 51
AG3-2013#-X	19" - 20"	48.5 - 51
AG3-2016#-X	19" - 20"	48.5 - 51
AG3-2018#-X	19" - 20"	48.5 - 51
AG3-2020#-X	19" to 20"	48.5 to 51

マックスコンツァー(AG6)

空気マットのみ(A)、空気マット+腰部支持(AL)タイプのインサートのみがございませす

型番	車いすのサイズ (in.)	車いすのサイズ (cm)
AG6-1416#-X	13" - 14"	33 - 35.5
AG6-1418#-X	13" - 14"	33 - 35.5
AG6-1420#-X	13" - 14"	33 - 35.5
AG6-1516#-X	14" - 15"	35.5 - 38
AG6-1518#-X	14" - 15"	35.5 - 38
AG6-1520#-X	14" - 15"	35.5 - 38
AG6-1616#-X	15" - 16"	38 - 40.5
AG6-1618#-X	15" - 16"	38 - 40.5
AG6-1620#-X	15" - 16"	38 - 40.5
AG6-1716#-X	16" - 17"	40.5 - 43
AG6-1718#-X	16" - 17"	40.5 - 43
AG6-1720#-X	16" - 17"	40.5 - 43
AG6-1816#-X	17" - 18"	43 - 45.5
AG6-1818#-X	17" - 18"	43 - 45.5
AG6-1820#-X	17" - 18"	43 - 45.5
AG6-1916#-X	18" - 19"	45.5 - 48.5
AG6-1918#-X	18" - 19"	45.5 - 48.5
AG6-1920#-X	18" - 19"	45.5 - 48.5
AG6-2016#-X	19" - 20"	48.5 - 51
AG6-2018#-X	19" - 20"	48.5 - 51
AG6-2020#-X	19" - 20"	48.5 - 51

ROHO・アジリティ・アクティブシリーズサイズ表

アルミニウム・ミニマムコンツァー

型番	幅 (in.)	幅 (cm)	高 (in.)	高 (cm)
AG2-1408F-2A	13 ¾" - 14 ¾"	34.9 - 37.5	8"	20.3
AG2-1410F-2A	13 ¾" - 14 ¾"	34.9 - 37.5	10"	25.4
AG2-1508F-2A	14 ¾" - 15 ¾"	37.5 - 40	8"	20.3
AG2-1510F-2A	14 ¾" - 15 ¾"	37.5 - 40	10"	25.4
AG2-1608F-2A	15 ¾" - 16 ¾"	40 - 42.5	8"	20.3
AG2-1610F-2A	15 ¾" - 16 ¾"	40 - 42.5	10"	25.4
AG2-1708F-2A	16 ¾" - 17 ¾"	42.5 - 45.1	8"	20.3
AG2-1710F-2A	16 ¾" - 17 ¾"	42.5 - 45.1	10"	25.4
AG2-1808F-2A	17 ¾" - 18 ¾"	45.1 - 47.6	8"	20.3
AG2-1810F-2A	17 ¾" - 18 ¾"	45.1 - 47.6	10"	25.4

アルミニウム・ミッドコンツァー

型番	幅 (in.)	幅 (cm)	高 (in.)	高 (cm)
AG3-1408F-2A	13 ¾" - 14 ¾"	34.9 - 37.5	8"	20.3
AG3-1410F-2A	13 ¾" - 14 ¾"	34.9 - 37.5	10"	25.4
AG3-1508F-2A	14 ¾" - 15 ¾"	37.5 - 40	8"	20.3
AG3-1510F-2A	14 ¾" - 15 ¾"	37.5 - 40	10"	25.4
AG3-1608F-2A	15 ¾" - 16 ¾"	40 - 42.5	8"	20.3
AG3-1610F-2A	15 ¾" - 16 ¾"	40 - 42.5	10"	25.4
AG3-1708F-2A	16 ¾" - 17 ¾"	42.5 - 45.1	8"	20.3
AG3-1710F-2A	16 ¾" - 17 ¾"	42.5 - 45.1	10"	25.4
AG3-1808F-2A	17 ¾" - 18 ¾"	45.1 - 47.6	8"	20.3
AG3-1810F-2A	17 ¾" - 18 ¾"	45.1 - 47.6	10"	25.4


カーボン・ミニマムコンツァー

型番	幅 (in.)	幅 (cm)	高 (in.)	高 (cm)
AG2-1410A-2CB	14"	35.5	10"	25.4
AG2-1413A-2CB	14"	35.5	13"	33
AG2-1416A-2CB	14"	35.5	16"	40.6
AG2-1510A-2CB	15"	38	10"	25.4
AG2-1513A-2CB	15"	38	13"	33
AG2-1516A-2CB	15"	38	16"	40.6
AG2-1610A-2CB	16"	40.5	10"	25.4
AG2-1613A-2CB	16"	40.5	13"	33
AG2-1616A-2CB	16"	40.5	16"	40.6
AG2-1710A-2CB	17"	43	10"	25.4
AG2-1713A-2CB	17"	43	13"	33
AG2-1716A-2CB	17"	43	16"	40.6
AG2-1810A-2CB	18"	45.5	10"	25.4
AG2-1813A-2CB	18"	45.5	13"	33
AG2-1816A-2CB	18"	45.5	16"	40.6

カーボン・ミッドコンツァー

型番	幅 (in.)	幅 (cm)	高 (in.)	高 (cm)
AG3-1410A-2CB	14"	35.5	10"	25.4
AG3-1413A-2CB	14"	35.5	13"	33
AG3-1416A-2CB	14"	35.5	16"	40.6
AG3-1510A-2CB	15"	38	10"	25.4
AG3-1513A-2CB	15"	38	13"	33
AG3-1516A-2CB	15"	38	16"	40.6
AG3-1610A-2CB	16"	40.5	10"	25.4
AG3-1613A-2CB	16"	40.5	13"	33
AG3-1616A-2CB	16"	40.5	16"	40.6
AG3-1710A-2CB	17"	43	10"	25.4
AG3-1713A-2CB	17"	43	13"	33
AG3-1716A-2CB	17"	43	16"	40.6
AG3-1810A-2CB	18"	45.5	10"	25.4
AG3-1813A-2CB	18"	45.5	13"	33
AG3-1816A-2CB	18"	45.5	16"	40.6

製品比較表

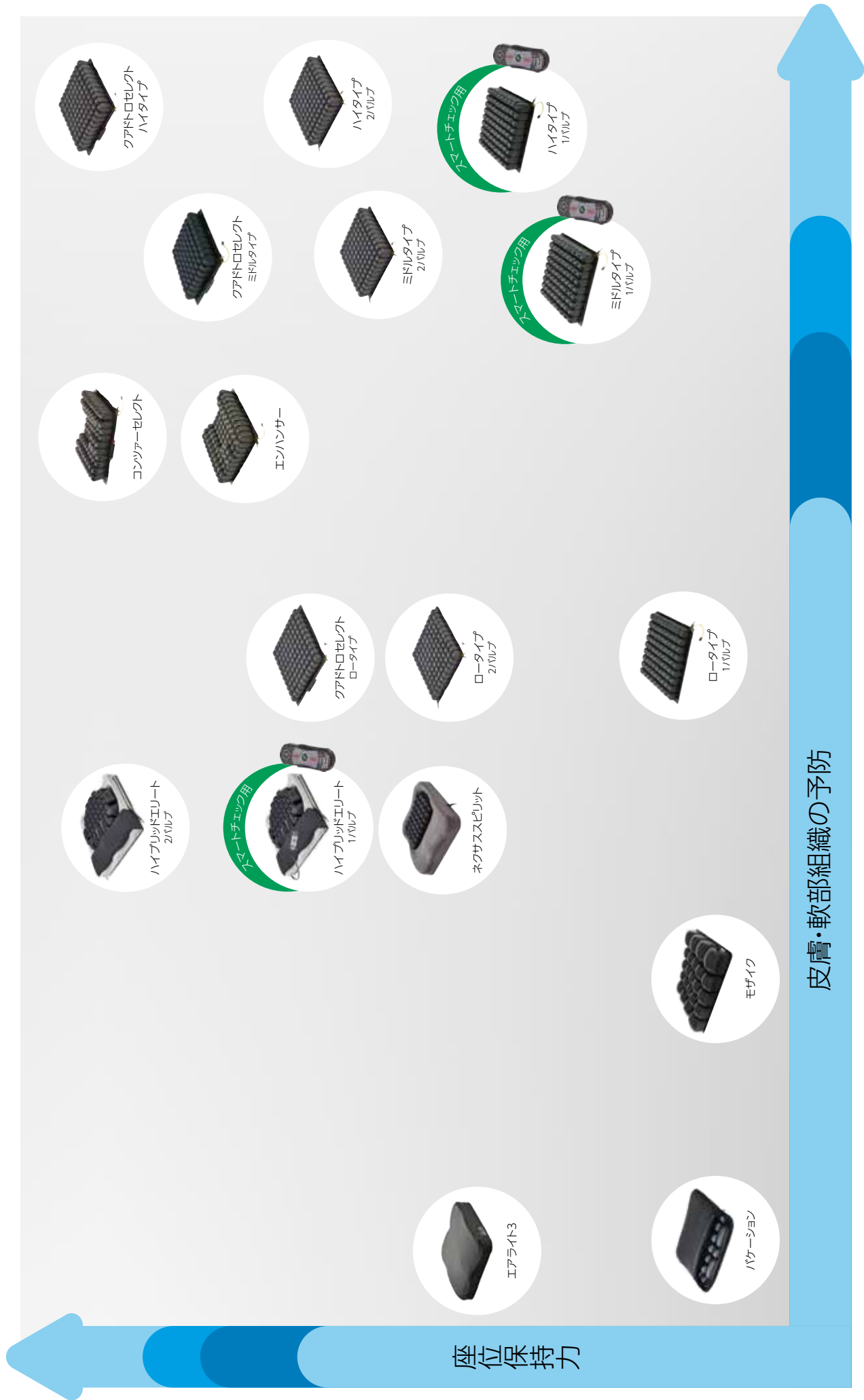

座位保持力

皮膚・軟部組織の予防

ご使用とお手入れ

ROHO製品は使いやすく、お手入れも簡単です。

ほとんどのROHO製品には手動ポンプと取扱説明書が付属しています。取扱説明書にはセットアップ、取り扱い上の注意、洗浄方法のほか、カスタマーサポートや製品保証について記載されています。

洗浄と消毒

洗浄と消毒は別のプロセスです。消毒の前に洗浄してください。

別の方が使用される場合は、本製品を洗浄・消毒し、適切に機能していることをご確認ください。

カバー、ウレタンベース、背もたれを洗浄・消毒する場合は、それぞれの製品の取扱説明書をご確認ください。

クッションを洗浄する:カバーを外してバルブを閉じ、大きめのシンクに入れます。中性液体洗剤、台所用洗剤、洗濯用洗剤または多目的洗剤で手洗います。(製品のラベルの説明に従ってください。)柔らかいプラスチック製のブラシ、スポンジまたは布でクッションの表面をやさしくこすって洗います。きれいな水ですすぎ、自然乾燥させます。直射日光を避けてください。

クッションを消毒する:家庭用の漂白剤と水を1:9の割合に希釈し、洗浄の手順で洗います。漂白剤希釈液で製品を10分間浸け置きします。きれいな水で十分にすすぎ、自然乾燥させます。

備考:メーカー推奨濃度で使用すれば、消毒剤のほとんどは安全です。

ROHO製品の洗浄・消毒の詳細は、各製品の取扱説明書をご確認ください。

廃棄・リサイクル

廃棄:本書に記載されている製品は、適切に使用し、地域の規制に従って廃棄した場合、その構成部品が既知の環境危険因子に関連することはありません。

焼却する場合は、認可を受けた正規の廃棄物管理施設で処理してください。

リサイクル:本製品のリサイクル方法については自治体にお問い合わせください。リサイクルの詳細については、当社にお問い合わせください。

返品

返品に伴い、費用が発生する場合があります。返品される場合は、事前に購入元までご連絡ください。

保証に関する情報

ROHO製品の保証についてご不明な点は、カスタマーサポートまでお問い合わせください。

米国以外では、現地のペルモビール販売店にお問い合わせください。

最新のROHO販売店の一覧は当社ウェブサイト permobilkk.jp でご確認ください。お電話でお問い合わせください。メールの場合は Info.jp@permobil.com までお送りください。

製品保証が適用されない製品に対して修理やサービスを実施する場合、必要な費用を申し受けることがあります。

備考:アダプター以外のすべての製品にポンプと修理キットが付属しています。すべてのROHO製品には取扱説明書が付属しています。

備考:以下の製品を除くすべてのROHOクッションとROHOバックサポートにはカバーが付属していません。シャワー・トイレクッション、トイレシート、アダプター、ヒールパッド、ランバーサポート

品質管理

ペルモビールのグループ企業であるROHOはFDAモデルを上回る品質管理体制を整備しています。また、ROHOの品質管理システムは10年以上前から2つのISO規格認証を受けています。ROHOの品質管理システムはISO13485:2016の認証を受けています。

©2020 PERMOBIL

ペルモビールは製品を継続的に改良する方針を定めており、合わせて本書は改訂される場合があります。本書の最新版はPermobilkk.jpでご確認ください。

以下は、ペルモビール、ROHOの商標および登録商標です。

ADAPTOR®, AGILITY®, AGILITY CARBON™, AIR FLOATATION™, AirLITE®, CONTOUR SELECT®, DRY FLOATATION®, Yellow Rope®, ENHANCER®, Hybrid Elite®, Hybrid Elite SR™, ISOFLO Memory Control®, LOW PROFILE®, MID PROFILE™, MINI-MAX®, MOSAIC®, nexus SPIRIT®, QUADTRO SELECT®, ROHO®, Shape Fitting Technology®, Sensor Ready™, Smart Check®.

Therafin® はTherafin Corporationの登録商標です。Ultra Leather™はUltra Fabricsの登録商標です。Inc.Zytel® はDuPontの登録商標です。

正規ROHO製品:ROHOのロゴマーク、イエローロープと、カバー内部に収められている当社独自の黒いエアセルが、正規のROHO製品の証です。

A life that touches others goes on forever.

In Memoriam
Russell Rodriguez
1973-2017



permobil

ペルモビル株式会社

〒135-0004

東京都江東区森下2丁目7番地6号

Tel: 03-6659-9500 Fax: 03-6659-9507

※営業時間 10:00 ~ 18:00 (土・日・祝日・弊社休業日を除く)



販売店



| @permobiljapan

ペルモビル株式会社 2021年4月発行