




Supracor®

スプラコール

NEW

スチームライトクッション コントア・アジャスタブル

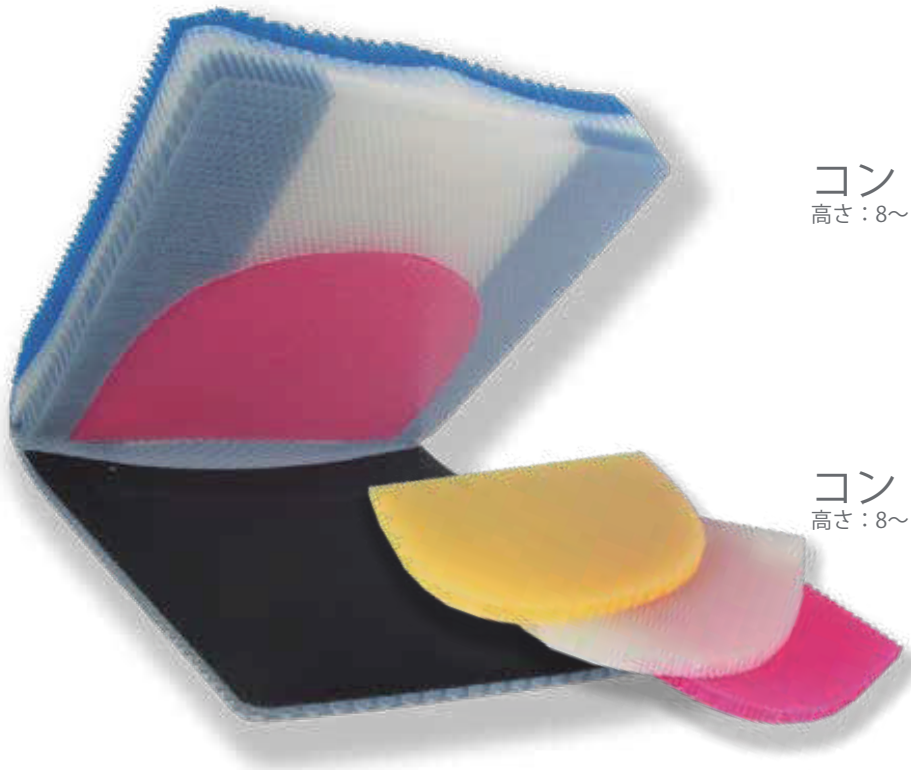

コントア アジャスタブル

高さ：8~10cm, 3層構造 重さ：約2kg, 体重制限：130kg

サイズ	幅×奥行	製品番号
14"×16"	(36×41cm)	CDADJ1416
16"×16"	(41×41cm)	CDADJ1616
16"×18"	(41×46cm)	CDADJ1618
18"×16"	(46×41cm)	CDADJ1816
18"×18"	(46×46cm)	CDADJ1818

コントアXS アジャスタブル

高さ：8~10cm, 3層構造 重さ：約2kg, 体重制限：120kg

サイズ	幅×奥行	製品番号
14"×16"	(36×41cm)	CDADJ1416X
16"×16"	(41×41cm)	CDADJ1616X
16"×18"	(41×46cm)	CDADJ1618X
18"×16"	(46×41cm)	CDADJ1816X
18"×18"	(46×46cm)	CDADJ1818X



スチームライトクッション コントア アジャスタブルは、ユーザーの身体的・機能的ニーズに合わせてカスタマイズできる新たな可能性を備えた、人気のコントアクッションの次世代版です。

優れた姿勢保持と卓越した体圧分散を提供します。多層式のハニカムで絶妙なコントア形状を作り出し、柔らかいエリアと硬めのエリアで特別に設計されています。クッション後方のくぼみは姿勢とその保持を改善するために最適な骨盤のポジションを提供します。

クッションの底に作られた調整用のくぼみによって、柔らかさの異なる複数の"ハニカムインサート"を選んで簡単にクッションをカスタマイズすることができます。

柔らかいインサートは硬いインサートと比較して、より沈み込みやすくなります。インサートをすべて取り外せば、臀部に骨突起のあるユーザーはさらなる安心感を得られます。沈み込みや皮膚の保護、ポジショニング特性に加え、クッション底部のインサート層は骨盤傾斜のようなポディショニングのニーズに合わせて使うこともできます。


インサート	対象となる方
① 無し	座骨結節または他の骨突起から可能な限り圧力を取り除く必要がある方。
② 白	筋緊張低下で褥瘡のリスクの高い方。 骨盤への巻き込み（サポート）が増加します。
③ ピンク	座位がやや安定しているユーザー。 ①のハニカムインサートなしと比較して褥瘡リスクの低い方。
④ 黄色	座位が安定しているユーザー。 トランスファーが自立している方。 ①～③に比べ、褥瘡リスクの低い方。
⑤ 上：白 下：ピンク	座位バランスが良く、さらに安定した座位が必要なユーザー。 トランスファーが自立している方。 自身で除圧プッシュアップが可能な方。
⑥ 上：白 下：黄色	硬めの座り心地で、最も安定した座位を必要とするユーザー。 除圧プッシュアップが可能な方。 褥瘡のリスクが低いユーザー。

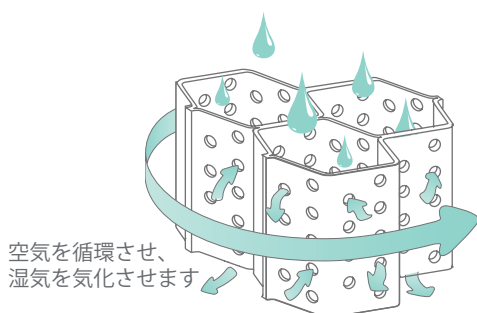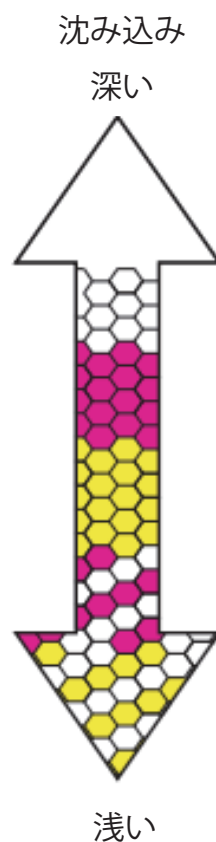

換気システム

皮膚の保護

継続的に湿気があると皮膚は軟化し、褥瘡が発生しやすくなります。スティムライトのハニカム組織は多孔質であることから、空気をクッション内部で循環させ、湿気を気化させることができます。通気性のあるカバーは、皮膚の乾燥状態を保つのに役立ちます。スティムライトのクッションだけでなく、カバーもまた洗濯機や乾燥機にかけることができますので、最良の衛生状態を保つことができます。

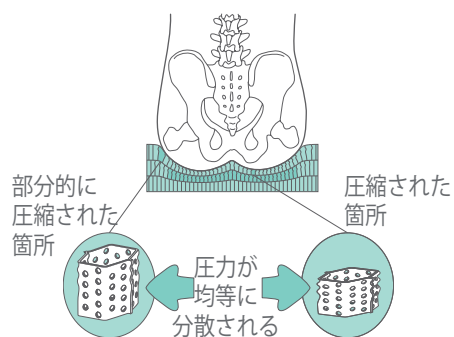

体圧の分散

圧力の緩和

ハニカム組織は、座ることによって発生する圧力を均等に分散することができます。スティムライトのクッションは、そのような圧力を緩和することにより、坐骨の弱点となる箇所への負担をやわらげることができます。その結果、坐骨は身体の周辺の部位と同じような圧力となります。

スティムライトクッションはさまざまな硬さの層によって、面状に非常に広く圧力が分散されて身体に適合します。

総輸入販売元
株式会社テレウス
〒271-0076 千葉県松戸市岩瀬153-1 アセツ松戸102号
TEL:047-369-1919 / FAX:047-308-4331
info@terreus.co.jp http://www.terreus.co.jp

有限会社イフ

〒080-2463 北海道帯広市西23条北2丁目11番14
TEL: 0155-38-8380 FAX: 0155-37-3009
<https://e-if.jp/>