

テレウスオリジナル 車いす用 アンダーバッグ




TERREUS
Co., Ltd.

オープンフレーム固定タイプ



オープンフレーム用*アンダーバッグ
※ボトムレール無し


- ・前面ポケット付き
- ・ファスナー付きなので車載時に中身が出てくる心配がありません

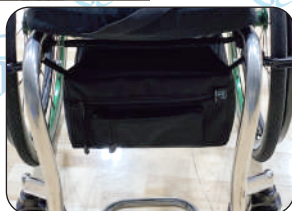

● 使用方法・確認事項

シートレールにベルクロ付きベルトを回して固定します

スカートガードやブレーキに干渉する場合があります
シートレールとスカートガードの間に隙間があるか、シートレールとブレーキ取付部の間に隙間があるかを必ず購入前に確認してください

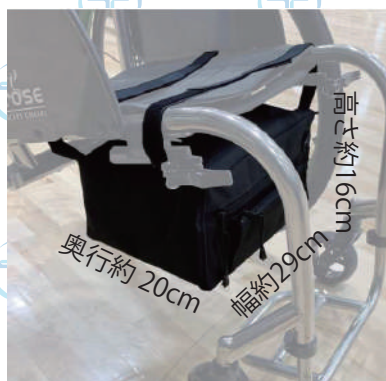

11,000円（税込）

株式会社テレウス
〒271-0076

千葉県松戸市岩瀬 153-1 アセツ松戸 102号
TEL:047-369-1919 / FAX:047-308-4331
info@terreus.co.jp <http://www.terreus.co.jp>

ワンタッチ着脱タイプ



指一本で着脱できるアンダーバッグ

- ・FIDLOCKマグネットバックルを採用
- ・前面ポケット付き

FIDLOCK



● 使用方法・確認事項

左右のアップフレームにベルクロベルトをそれぞれ固定します

車種によってはクロスメンバーが干渉します
折りたたみ時にバッグが干渉して折りたたみにくくなる場合があります
バッグのサイズをご確認の上購入してください



13,200円（税込）

有限会社イフ

〒080-2463 北海道帯広市西23条北2丁目11-14
TEL:0155-38-8380 FAX:0155-37-3009
URL:<https://e-if.jp/>

日本製

着脱式アンダーバッグ 取付方法



● バッグ構成



● 取付動画



● 注意

FIDLOCKマグネットバックルについているループを強く引っ張るとバックルが破損する可能性があります。
必ずバッグ本体を支えながら着脱してください。
車いすに座った状態で着脱作業をすると転倒しけがをするおそれがあります。
必ず車いすから降りて着脱してください。