


● リチウムイオンバッテリーの最大使用期限

リチウムイオンバッテリー（ESB1）は、最初の充電開始から8年経過、または積算充電容量が8000Ahに達すると充電ができなくなります。

● 長期使用のお知らせ

最初の充電開始から7年9ヶ月、または積算充電容量が7800Ahに達すると、容量表示ランプでお知らせします。充電完了時、充電プラグを抜いた後に右図のように容量表示ランプが点灯・消灯します。

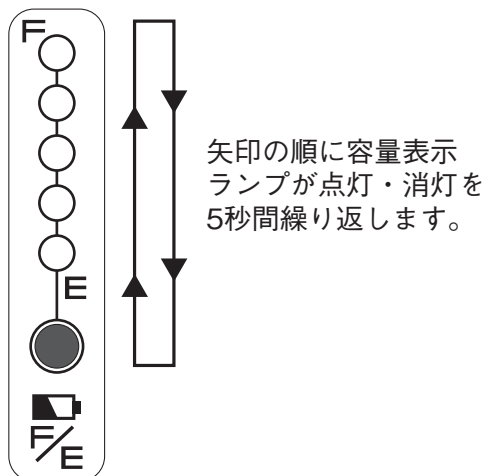


● 使用期限に達した場合

使用期限に達した場合は、充電時充電器のランプが点灯せず、バッテリーの容量表示ランプが点灯しなくなり充電できません。

要 点

● リチウムイオンバッテリーを使い始めた年月日を忘れてしまったら。

バッテリー底面に製造年月日が記載されています。参考にしてください。

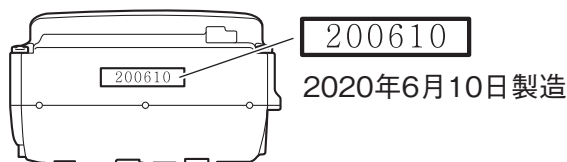

● バッテリーは、工場出荷後の最初の充電日を使用開始日と認識します。

（上記製造年月日とは一致しません。）

● 積算充電容量が8000 Ahに達した場合には、8年が経過していなくても使用できなくなります。

※積算充電容量8000 Ahは、リチウムイオンバッテリー「ESB1」のバッテリー容量の約700倍（残量ゼロから満充電したときの約700回分）です。

● バッテリーの劣化について

バッテリーは消耗品です。バッテリーは、使うことによって、また時間が経過することによっても徐々に劣化し、容量が減少します。

劣化によって容量が減少する割合は、使い方によって異なります。

要 点

リチウムイオンバッテリーの劣化によって容量が減少する割合は、満充電から警告ランプが点滅するまで使ったと仮定した場合、充電回数700回で新品時容量の約60%に減少します。

バッテリー容量は、未使用であっても長期間保存した場合には、劣化して減少します。

複数のバッテリーを使用の際は、交互にお使いください。