

## 車いすやバギーで移動される すべての方々へ...

朝起きたら、銀色の雪景色。昨日までの世界とは違い、すべての音は雪に吸収され、静かに時は流れる。その中を車いすで散歩し、新鮮な空気と雪に触れながら、あなただけの新しい冬の日の対話を楽しみませんか？

「雪の中で車いすやバギーで移動するのは無理」、と考えている方や「タイヤは雪用に交換しても、キャスターが雪の中に沈んで旨く移動しない・・・」と思われる方にお勧めしたいのが、ホイールブレードです。

ホイールブレードは必要な時にワンタッチでキャスターに装着して雪上移動を補助するブレードです。



### お問合せ先 有限会社イフ

〒080-2463 北海道帯広市西23条北2丁目11番14  
TEL: 0155-38-8380 (代表) FAX: 0155-37-3009  
<https://e-if.jp/>  
info@e-if.jp

オットーボック・ジャパン株式会社 〒108-0023 東京都港区芝浦4-4-44 横河ビル8F  
www.ms.ottobock.jp TEL 03-3798-2111 (代表) FAX 03-3798-2112

## ホイールブレード

ホイールブレードで新しい冬を体験しませんか？

Quality for life



# Wheelblades より自由に



開発者のパトリック マイヤー氏はスイスに住む車いすユーザーです。彼は、車いすでの生活を送る中、毎年、冬になると悲しい気持ちで過ごしていました。まだ若い彼にとり友達や彼女と出かけたいという気持ちが強くあっても、スイスという土地柄、雪が降ると家の中で過ごすことが多くなるからです。「僕は小さい頃から雪や冬が大好きだったのに、それを楽しめない。出かけることもできない。なんとかしたい・・・。」その様な思いの中から生まれたのがこのホイールブレードです。パトリックは「これを作って僕自身の生活範囲がとてと広がった。でもそれだけでなく、雪の中を走り回るとい長年の夢が叶って本当に生活が楽しくなったよ。この喜びを多くの人にも是非味わってもらいたい」と言います。

## 特徴

- 小さな力でもワンタッチで着脱可能
- 必要な時にさっと取付け可能
- かさばらず軽いブレードはどこでも持ち歩き可能  
かばんに入れて雪上へ
- サイズ調整が可能のため、様々なキャスターに対応
- サイズによってはバギーでの使用も可能
- 車いす介助による雪上での移動も可能

## 装着方法



- 予めキャスター径に合わせてホイールブレードの幅を調整しておきます。




- ホイールブレードをキャスター前方近くに置きます。



- 少しだけキャスター上げをし、ホイールブレードの上にキャスターを乗せます。(もしくはキャスターの下にスライドして入れます。) \*この際、車いすが転倒の危険を避けるために介助者がいる場合には介助をお願いしてください。



- クランプをロックしたら完了。

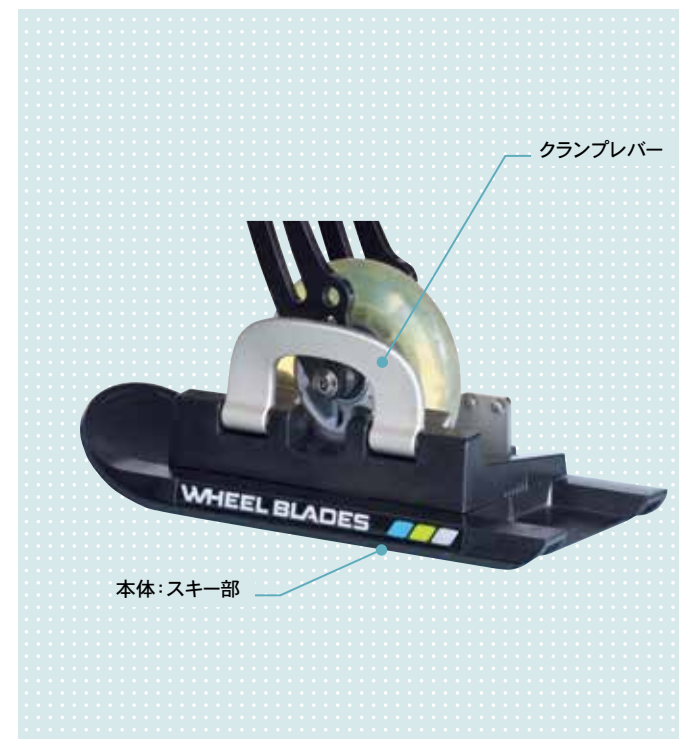

## テクニカルデータ

### サイズおよび重量

装着可能キャスター幅: 20mm~60mm  
装着可能キャスター径: 80mm~200mm  
重量: 500g (1ユニット)  
適応気温: -20℃~30℃